

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2026.02.03. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégezési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
	Nemzetközi Synlab hálózat vizsgálatait külön táblázatban találhatók.											
	Reggel 7 és 9 óra között (javasolt éhgyomorral)	■										
	Éhgyomorral (12 órás éhezést követően)	▲										
	A vérvétel után azonnali fagyasztást igénylő vizsgálat	◆										
	A vérvétel napján (ha az aznapi szállítás nem megoldható) fagyasztást igénylő vizsgálat	●										
1	17-OH-progeszteron (17OHP)	■ ●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső							6 hónap	Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
! 2	25-hidroxi-D-vitamin		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	az analízisig	
3	Acethylcholin receptor elleni autoantitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap		
4	Adiponektin	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra				6 hónap	Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
5	Adrenocorticotrop hormon (ACTH)	■ ◆	Plazma	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)		Nem tárolható	Nem tárolható	Nem tárolható	Nem tárolható	* Nem tárolható	1 hónap	Vérvétel után a csövet azonnal centrifugálni, a plazmát mádlagos csőbe leönteni és -20 °C-ra fagyasztani szükséges legalább 12 óráig. Fagyasztva szállítandó.
! 6	Aktív B12 vitamin (Holotranszkobalamin)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						14 nap	6 hónap	
7	Aktivált parciális thromboplasztin idő (APTI)		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			4 óra	4 óra	14 nap	Rutin alvadási vizsgálat. Aznap levett minta küldése javasolt a primer csőből.
8	Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT)	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	az analízisig	
! 9	Albumin	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			30 nap	az analízisig	
10	Albumin, liquor		Liquor	Fehér kupakos vérvételi cső						3 nap	6 hónap	A centrifugált liquor felülúszója tárolható.
11	Aldoszteron	■ ◆	Plazma	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)					nem tárolható	5 nap	1 hónap	Reninrel együtt kérve vérvétel után a csövet azonnal centrifugálni, a plazmát leönteni és -20 °C-ra fagyasztani szükséges legalább 12 óráig. Fagyasztva szállítandó. Vérvétel előtt minimum 30 perces állás és vagy fekvés szükséges.
12	Alfa-1 antitripszin	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						7 nap	3 hónap	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2026.02.03. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégezési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
! 13	Alfa-amiláz		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap		
14	Alfa-fetoprotein (AFP), tumorantigén		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
! 15	Alkalikus foszfatáz	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	az analízisig	
! 16	Alkalikus foszfatáz, csontspecifikus izoenzim	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			3 nap	az analízisig	
17	Allergénspecifikus IgE (atopia panel)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap		
! 18	Allergénspecifikus IgE (nutritív, inhalatív, méh-darázs extraktum)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	6 hónap	
19	Alzheimer-kór kockázatbecslés		Plazma	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)		Nem tárolható	Nem tárolható	Nem tárolható			3 hónap	A mintát a vérvételt követő két órán belül centrifugálni, plazmát leönteni és fagyasztani kell. A minta 24 órás fagyasztás után szállítható a laboratóriumba.
20	AMA, simaizom elleni , retikulín elleni, LKM, endothel, parietális sejt elleni antitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	6 hónap	
21	Amiláz, testnedv		Testnedv	Adalékmentes dugós műanyag cső		2 nap	10 nap	Nem tárolható				
22	Amiláz, vizelet		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső		2 nap	10 nap	Nem tárolható				
23	ANA BLOT		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
24	ANA ELISA		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		8 óra	14 nap	6 hónap	
25	ANA Hep-2 IF		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		8 óra	14 nap	6 hónap	
26	ANCA mintázat, titer, MPO/PR-3		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
27	ANCA profil: laktoferrin, katepszin G, elasztáz, BPI lizozim antitestek		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
! 28	Androsztendion	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						31 nap	12 hónap	
29	Annexin V IgG/IgM		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
30	Anti-C1q		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
! 31	Anti-Müllerian Hormon (AMH plusz)	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
! 32	Anti-streptolizin O (AST/ASO), kvalitatív		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			8 nap	az analízisig	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2026.02.03. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérumból minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégezési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérumból, plazmából)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
33	Antithrombin III	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			4 óra	4 óra	24 óra	Mintavétel után centrifugálni 3500 rpm-n 15 percig. A plazma felső 2/3-át szekunder csőbe leszívva, a plazmát újrafugálni 3500 rpm-n 15 percig, majd ennek a felső 2/3-át 1-1,5 ml-ként tercier csővekbe átszívni. -20 °C-ra fagyasztani szükséges minimum 12 óráig. Fagyasztva szállítandó. Az alkalmazott gyógyszeres terápiát, illetve annak felfüggesztését a kérlapon fel kell tüntetni. Mintamennyiségek: - Egy teljes thrombophilia panel esetében 6-7 primer 3,5 mL cső levétele szükséges. Ezekből legalább 5 szekunder csövet kell készíteni úgy, hogy minimum 1-1,5 mL plazma legyen mindegyik csőben. - Egyedi alvadási vizsgálatok esetén vizsgálatonként 1 db primer cső levétele szükséges. - Szekunder csövek tekintetében az alábbiak szerint kell eljárni: 2-3 vizsgálat esetén min. 2 szekunder cső szükséges 4-5 vizsgálat esetén min. 3 szekunder cső szükséges 5 vagy több vizsgálat esetén min. 5 szekunder cső szükséges. Amennyiben a vérvételtől számított 4 órán belül a minta nem érkezik be a laboratóriumba, a plazmát fagyasztani kell! A speciális alvadási vizsgálatokra vonatkozó részletes minta kezelési tájékoztató is elérhető. https://www.synlab.hu/storage/app/uploads/media/PrimerSzekunderVerveteliCsok.pdf
34	Anti-Xa	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)						4 óra		Lásd részletesen az Antithrombin III -nál. (33.sor). A vérvételnek a gyógyszer bevétele után 4 órával kell történnie.
35	APC rezisztencia	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			4 óra	4 óra		Lásd részletesen az Antithrombin III -nál. (33.sor)
36	Aquaporin-4 (NMO) antitest		Szérumból	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			8 nap	6 hónap	
37	Arzén vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			5 nap	2 hét				A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
38	ASCA IgG/IgA		Szérumból	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
39	Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT)	▲	Szérumból	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	az analízisig	
40	Autoimmun bőrbetegségek autoantitestjei (BMZ + dezmozóma)		Szérumból	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
41	Autoimmun gastritis panel (rég: Intrinsic elleni antitest)		Szérumból	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	6 hónap	
42	Autoimmun májbetegség autoantitest profil: AMA2, LKM1, LC, SLA, dezmin, myozin, F-aktin		Szérumból	Natív v. clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	6 hónap	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2026.02.03. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégezési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
43	Autoimmun myositis autoantitest profil (Jo-1, PM/ScI, Ku, SRP, Mi-2, Pl-7, Pl-12)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
! 44	B12 vitamin	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		8 óra	2 nap	56 nap	
45	B2-GPI IgG/IgM		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
46	Béta-2 mikroglobulin	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	3 hónap	
47	Béta-2 mikroglobulin, vizelet		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső			7nap	nem tárolható		14 nap		A páciens ürítse ki a hólyagját, majd ezt követően igyon 1 pohár vizet és 1 óra múlva ürítse ki újból. Ebből kell egy csőben a meghatározásra küldeni a mintát. * Nem fagyasztható.
48	Béta-crosslaps	■ ●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					6 óra	8 óra	3 hónap	Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
49	Bilirubin, konjugált	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	6 hónap	Szállítás és tárolás alatt a mintát fénytől kell védeni.
50	Bilirubin, total	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	6 hónap	Szállítás és tárolás alatt a mintát fénytől kell védeni.
51	C reaktív protein (CRP)/ ultraszenzitív CRP		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			2 hónap	3 év	
! 52	C1 eszteráz inhibitor (aktivitás)	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)					4 óra	48 óra	2 hét	Vérvétel után a csövet azonnal centrifugálni, a plazmát másodlagos csőbe leönteni és -20 °C-ra fagyasztani szükséges legalább 12 óráig. Fagyasztva szállítandó.
53	C1 eszteráz inhibitor (antigén)		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)					Nem tárolható	7 nap	1 év	
54	CA 125		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		8 óra	5 nap	6 hónap	
! 55	CA 15-3		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		8 óra	5 nap	3 hónap	
56	CA 19-9		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			30 nap	3 hónap	
! 57	CA 72-4		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			30 nap	3 hónap	
58	Calprotectin		Széklet	Speciális mintavételi eszköz			4 nap	6 hónap	-	5 nap	-	A mintavételi eszköz a laboratóriumból igényelhető ld. a speciális mintavételi tájékoztatót is. A nem előírás szerint vett minta (túltöltés/ kevés minta) vizsgálatra nem alkalmas. https://www.synlab.hu/storage/app/media/PreAnalytikai%20mintaveteli%20eszkoz%20hasznalasi%20utmutato.pdf
59	Carcino-embriónális antigén (CEA)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
! 60	CCP elleni antitest (Anti-CCP)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			8 nap	12 hónap	
61	CD4+/CD8+ sejtarány	■	Teljes vér	Zöld kupakos vérvételi cső (Lithium Heparin)		24 óra			-	7 nap	-	Mintavétel kizárólag a Podmaniczky utcai laboratóriumban, előzetes bejelentkezés alapján, kedden és csütörtökön de. 9:30-ig

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2026.02.03. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégezési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

ssz	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
62	Celluláris immunstátusz		Teljes vér	Zöld (Li heparinos) és lila (EDTA) kupakos vérvételi cső		24 óra			-	-	-	Mintavétel kizárólag a Podmaniczky utcai laboratóriumban, előzetes bejelentkezés alapján, kedden és csütörtökön de. 9:30-ig
63	Chromogranin A		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	2 hónap	Mintavétel előtt 2 héttel a gyomorsavszekréciót gátló gyógyszert ki kell hagyni.
! 64	Cink - szérum		Szérum	Sötétkék kupakos nyomelemes cső						3 nap	1 hónap	Mintavétel után 30 perccel a vérminta centrifugálása és a felülúszó szeparálása szükséges (mivel nincs gélseparátor). A szekunder csöveket sötétkék jellel (matrica, filctoll) ellátni szükséges. Hűtve (+4C) tárolandó és szállítandó de fagyasztni is lehet.
65	Cink ejakulátum		Szeminális plazma	Adalékmentes dugós műanyag cső, vagy csavaros fedelű műanyag pohár				2 hónap				Az ejakulátumot a mintaadás után azonnal fagyasztani szükséges -20C-ra vizsgálatonként külön-külön. (pl három vizsgálat esetén három fagyasztott frakció szükséges) Fagyasztva szállítandó.
66	Cisztatin C		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra				3 hónap	
67	CK (Kreatin-kináz)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	1 hónap	
! 68	CK-MB (Kreatin-kináz, MB izoenzim)	 	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					4 óra	2 nap	az analízisig	Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
69	COLON AIQ (Multigénos kolorektális rák rizikóteszt)		Teljes vér	CWBio cső (alvadásgátló + DNS stabilizáló)		4 nap						Mintavétel után a csövet 8-10-szer átforgatni szükséges. A mintát hűteni fagyasztni tilos, rázkódástól, fénytől védeni szükséges (alufóliába tekerendő)!
70	Koronavírus (SARS-CoV-2) IgG elleni antitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap		
71	Cöliakia specifikus antitestek (transzglutamináz IgA/IgG autoantitestek)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
72	Cöroluplamin		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra				3 hónap	
! 73	C-peptid	 	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					Nem tárolható	Nem tárolható	az analízisig	Vérvétel után 30 perc múlva centrifugálás és szeparálás, a szérum azonnal lefagyasztható -20C-ra min. 12 óráig a szállítási. Fagyasztva szállítandó.
! 74	Cyfra 21		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			30 nap	6 hónap	
75	DAO - Hisztamin intolerancia		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		4 nap	5 nap	6 hónap	
76	Deamidált gliadin peptid (DGP) IgA elleni antitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
77	Deamidált gliadin peptid (DGP) IgG elleni antitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
! 78	Dehidro-epiandrosteron-szulfát (DHEA-S)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			6 nap	1 hónap	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2026.02.03. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

ssz	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
79	D-dimer, quantitativ		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			4 óra	4 óra	24 hónap	Rutin alvadási vizsgálat. Aznap levett minta küldése javasolt a primer csőből.
80	Digoxin		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		8 óra	2 nap	6 hónap	
81	Drog teszt 5 vagy 12 paraméteres		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső			24 óra					A nap bármely időpontjában vett spontán ürített vizelet; ha csapadékot tartalmaz a minta, le kell centrifugálni; a vizsgálatot a lehető leghamarabb el kell végezni.
82	ds-DNS		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
83	EMA IgA		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			48 óra			14 nap	6 hónap	
84	EMA IgG		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
85	ENA (Sm, RNP, SS-A, SS-B, SCL-70, Jo-1)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
86	Epesav (Össz-epesav)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		24 óra	7 nap	12 hónap	A terhesség III. trimeszterében (29. hét) az ajánlott mintavétel: ebéd után 20 és 30 perc között. Nem terheseknél a mintavétel éhgyomri.
87	Faktor II. (II. alvadási faktor)	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			4 óra	4 óra	6 hónap	*I Lásd részletesen az Antithrombin III -nál.(33.sor)
88	Faktor IX. (IX. alvadási faktor)	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			4 óra	4 óra	6 hónap	Lásd részletesen az Antithrombin III -nál.(32.sor)
89	Faktor V. (V. alvadási faktor)	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			4 óra	4 óra	4 hónap	Lásd részletesen az Antithrombin III -nál.(32.sor)
90	Faktor VII. (VII. alvadási faktor)	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			4 óra	4 óra	4 hónap	Lásd részletesen az Antithrombin III -nál.(32.sor)
91	Faktor VIII. (VIII. alvadási faktor)	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			4 óra	4 óra	3 hónap	Lásd részletesen az Antithrombin III -nál.(32.sor)
92	Faktor X. (X. alvadási faktor)	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			4 óra	4 óra	4 hónap	Lásd részletesen az Antithrombin III -nál.(32.sor)
93	Faktor XI. (XI. alvadási faktor)	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			4 óra	4 óra	4 hónap	Lásd részletesen az Antithrombin III -nál.(32.sor)
94	Faktor XII. (XII. alvadási faktor)	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			4 óra	4 óra	6 hónap	Lásd részletesen az Antithrombin III -nál.(32.sor)
95	Faktor XIII. (XIII. alvadási faktor)	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)					4 óra	4 óra		Lásd részletesen az Antithrombin III -nál.(32.sor)
96	Fehérje ELFO (szérum)	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		5 óra	24 óra			10 nap	Nem fagyasztható	Éhgyomri mintavétel ajánlott.
97	Fehérje ELFO (vizelet)		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső		6 óra	5 nap	Nem fagyasztható				
98	Fehérje ELFO + paraprotein azonosítás	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		7 óra	24 óra			10 nap	Nem fagyasztható	Éhgyomri mintavétel ajánlott.
99	Fenitoin		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		8 óra	24 óra			30 nap	3 hónap	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2026.02.03. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégezési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
! 100	Fenobarbitál		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		9 óra	24 óra			30 nap	3 hónap	
101	Ferritin	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		10 óra	24 óra			7 nap	1 év	
102	Fémallergia		Teljes vér	Zöld kupakos vérvételi cső (Lithium Heparin)		3 óra						Előjegyzés (+36303312892) és mintavétel kizárólag a Podmaniczky utcai laboratóriumban, előzetes bejelentkezés alapján.
103	Fibrinogén		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			4 óra	4 óra	18 hónap	Rutin alvadási vizsgálat. Aznap levett minta küldése javasolt a primer csőből.
104	Follikulus Stimuláló Hormon (FSH)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		12 óra	24 óra			14 nap	6 hónap	
105	Folsav		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					8 óra	2 nap	1 hónap	Szobahőn nem tárolható.
106	Foszfát	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			4 nap	az analízisig	
107	Foszfát, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			6 hónap					A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
108	Foszfát/kreatinin, vizelet		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső			2 nap					Reggeli első vagy második vizelet; foszfát /kreatinin ráta számoláshoz a vizelet kreatinin mérés is szükséges.
109	Foszfatidilszerin IgG elleni antitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
110	Foszfatidilszerin IgM elleni antitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
111	Foszfolipid antitest szűrés (kardiolipin IgG/IgM és β2GPI IgG/IgM) és azonosítás		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		4 óra	24 óra			14 nap	6 hónap	
112	Fruktózamin		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	2 hónap	
113	Gamma-glutamil-transzferáz (GGT)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	az analízisig	
114	Gastropanel (Pepszinogén 1-2, Helicobacter pylori, Gasztrin-17)	▲ ◆	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	1 hónap	Szigorúan éhgyomri vérélet szükséges. Vérvétel után 30 perc múlva centrifugálás és szeparálás, a szérum azonnal lefagyasztandó -20C-ra min. 12 óráig a szállításig. Fagyasztva szállítandó.
115	GBM elleni antitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
116	Glükóz- éhomi, terheléses, post prandriális, időpontos*	▲	Plazma	Szürke kupakos vérvételi cső (NaF)								A jobb stabilitás miatt a ez a mintatípus ajánlott beszállított minták esetén. *PP vércukor időpontját a kezelőorvossal egyeztetni szükséges.
117	Glükóz, liquor		Liquor	Fehér kupakos vérvételi cső			mérésig	mérésig				A mintavételt követően a liquort azonnal a laboratóriumba kell juttatni.

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2026.02.03. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

ssz	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
118	Glükóz, nem terheléses / nem időpontos	▲	Plazma	Szürke kupakos vérvételi cső (NaF)			24 óra					Vérvételt követően 1 órán belül centrifugálni a géles csövet, 2-8 °C-on 24 óráig tárolható a minta. Nem géles cső esetén 1 órán belül másodlagos csőbe leöntendő. Glükóz terhelés esetén a minta Na-fluoridos csőben (plazma) küldendő.
119	Glükóz, vizelet		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső			mérésig			5 nap		Reggeli első, második vagy terhelés utáni vizelet
120	Glükóz, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			24 óra					A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
121	Gyógyszerallergia		Teljes vér	Zöld kupakos vérvételi cső (Lithium Heparin)		3 óra						Előjegyzés (+36303312892) és mintavétel kizárólag a Podmaniczky utcai laboratóriumban, előzetes bejelentkezés alapján. A vizsgálathoz a vérmintán kívül szükséges a vizsgálandó gyógyszer, és annak eredeti csomagolása.
122	Haptoglobin	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			8 hónap		Gyártói adat alapján
123	HDL koleszterin, direkt		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	az analízisig	
124	HE4 tumormarker		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		24 óra	24 óra			2 nap	3 hónap	
125	Hemoglobin A1c		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)		Nem tárolható	14 nap					
126	Higany, teljes vér		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)			1 hét					Mintaszállítás minden páros hét szerdáján történik a leinfeldeni laborba, ezért a minta vétele és bejuttatása a csepeli központba az azt megelőző 1-2 napban történjen.
127	Higany, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		Nem tárolható	1 hét	2 hét				A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 40 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
128	Homocisztein	▲ ◆	Plazma	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)		Nem tárolható	7 nap		*Nem tárolható	2 nap	3 hónap	Vérvétel után a csövet azonnal centrifugálni, a plazmát másodlagos csőbe leönteni és -20 °C-ra fagyasztni szükséges legalább 12 óráig. Fagyaszttva szállítandó.
129	Húgysav		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		1 óra	24 óra			7 nap	az analízisig	
130	Húgysav, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			Nem tárolható					A gyűjtés végén a mintát összekeverjük, és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell. Mielőbb a laboratóriumba juttatandó.
131	Human Chorio-Gonadotropin (HCG)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			2 nap	az analízisig	
132	IgG alosztályok	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			Nem tárolható			7nap	1 hónap	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2026.02.03. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

ssz	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
133	Immunglobulin A (IgA)	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		24 óra	24 óra			8 hónap()	az analízisig	(I) Gyártói adat alapján
134	Immunglobulin E, (total IgE)	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			-	6 hónap	
135	Immunglobulin G (IgG)	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			8 hónap()	az analízisig	(I) Gyártói adat alapján
136	Immunglobulin G, liquor	▲	Liquor	Adalékmentes dugós műanyag cső		*Nem tárolható	24 óra			3 nap	6 hónap	
137	Immunglobulin M (IgM)	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			4 hónap()	6 hónap()	(I) Gyártói adat alapján
138	Infertilitás Panel I-II-III		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		24 óra	24 óra			5 nap	6 hónap	
139	Inhibin B	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			2 nap	6 hónap	
140	Interleukin 6 (IL6)	●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		6 óra	2 nap	24 hónap	
141	Autoimmun gastritis panel		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			4 hónap	6 hónap	
142	Inzulin	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						2 nap	6 hónap	
143	Inzulin-szerű növekedési f. IGF-I	■ ◆	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					Nem tárolható	Nem tárolható	1 hónap	Vérvétel után 30 perc múlva centrifugálás és szeparálás, a szérum azonnal lefagyasztható -20C-ra min. 12 óráig a szállításig. Fagyasztható szállítandó.
144	Jód - szérum		Szérum	Sötétkék kupakos nyomelemes cső						24 óra	1 hónap	Mintavétel után 30 perc múlva a vérminta centrifugálása és a felülúszó szeparálása szükséges (mivel nincs gélszeparátor). A szekunder csöveket sötétkék jellel (matrica, filctoll) ellátni szükséges. Hűtve (+4C) tárolandó és szállítandó de fagyasztható is lehet.
145	Kadmium , teljes vér		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)			1 hét					
146	Kalcitonin	■ ◆	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					Nem tárolható	Nem tárolható	15 nap	Vérvétel után 30 perc múlva centrifugálás és szeparálás, a szérum azonnal lefagyasztható -20C-ra min. 12 óráig a szállításig. Fagyasztható szállítandó.
147	Kalcium		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			21 nap	az analízisig	
148	Kalcium, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			4 nap	21 nap		14 nap		A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
149	Kalcium/kreatinin vizelet		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső			48 óra					Reggeli első vagy második vizelet; Ca/kreatinin ráta számoláshoz a vizelet kreatinin mérés is szükséges.
150	Kálium		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			6 nap	az analízisig	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2026.02.03. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

ssz	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
151	Kálium, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			14 nap	Eltartható				A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
152	Karbamazepin		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			30 nap	3 hónap	
153	Karbamid		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	az analízisig	
154	Karbamid, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			7 nap	1 hónap				A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
155	Karboxihemoglobin		Teljes vér	Zöld kupakos vérvételi cső (Lithium Heparin)			1 hónap	Nem tárolható				A mintát szorosan lezárva kell tárolni. A minta megbontása esetén a mérést azonnal el kell végezni.
156	Kardiolipin elleni antitest (IgG/IgM)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		Nem tárolható	24 óra			14 nap	6 hónap	
157	Keton kimutatás vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			5 nap	1 hónap				A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
158	Klorid		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	eltartható	
159	Klorid, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			7 nap	Eltartható				A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
160	Kobalt teljes vér		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)			1 hét					
161	Kobalt vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			1 hét	2 hét				A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell!
162	Koenzim Q10	◆	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		Nem tárolható					7 nap	Vérvétel után a minta 20-30 perc múlva centrifugálendő, 1,5 ml szérumot azonnal sötített falú szekunder csőben szeparálni és min. 12 óráig fagyasztani szükséges -20C-on a szállításig.
163	Koleszterin		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		7 nap	24 óra			7 nap	az analízisig	
164	Komplement C3	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			8 nap	8 hónap	
165	Komplement C4	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		Nem tárolható	24 óra			8 nap	3 hónap	
166	Kortizol	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			4 nap	3 hónap	A mintavétel ébredés után 3 órával, éhgyomorra javasolt. A legmegfelelőbb időpont: 8:00 óra
167	Kortizol nyál		Nyál	Salivette tartály		Nem tárolható	48 óra	Nem tárolható			12 hónap	Mintavételi eszköz és mintavételi útmutató a raktarozas@synlab.hu e-mail címen rendelhető.

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2026.02.03. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

ssz	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
168	Kortizol, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			2 nap	az analízisig				A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
169	Kreatinin, enzimátikus		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	az analízisig	
170	Kreatinin, vizelet		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső			6 nap	6 hónap				Reggeli első vagy második vizelet Analit/kreatinin ráta számoláshoz
171	Kreatinin, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			6 nap	6 hónap				A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
172	Króm, teljes vér		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)			1 hét					
173	Króm, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			1 hét	2 hét				A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
174	Laktát-dehidrogenáz (LDH)	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			4 nap	az analízisig	
175	LDL-koleszterin, direkt		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		24 óra	24 óra			7 nap	az analízisig	
176	Leptin	■ ●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		Nem tárolható	24 óra				6 hónap	Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
177	Lipáz		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			21 nap	12 hónap	
178	Lipoprotein-a (Lp(a))	●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					8 óra	2 nap	nem fagyasztható	A mintát a mintavétel napján a laboratóriumba kell érkeznie.
179	Lítium		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		Nem tárolható	24 óra			7 nap	12 hónap	
180	Lupus antikoaguláns	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)					4 óra		1 hónap	Lásd részletesen az Antithrombin III -nál. (33.sor)
181	Luteinizáló Hormon (LH)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
182	M2-PK marker széket		Széket	Speciális mintavételi eszköz				4 hét		8 óra	-	A mintavételi eszköz a laboratóriumból igényelhető ld. a speciális minavételi tájékoztatót is. A nem előírás szerint vett minta (túltöltés/ kevés minta) vizsgálatra nem alkalmas. https://www.synlab.hu/storage/2/2pW471H9e5eWGEF8/2d61178m508WdfJgabi.pdf

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2026.02.03. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

ssz	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
183	Macro-TSH		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	1 hónap	A vizsgálat csak a https://synlab.hu/content/documents/trf/MAKRO_TSH_20240620.pdf (link) található kéréslap kitöltésével együtt kérhető
184	Magnézium		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	az analízisig	
185	Magnézium, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			3 nap	1 év				A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
186	Mátrix metalloproteináz 2 (MMP3)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	
187	Mellékvese, here: szteroid termelő sejt elleni antitest		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						14 nap	6 hónap	
188	Methemoglobin		Teljes vér	Zöld kupakos vérvételi cső (Lithium Heparin)		4 óra	24 óra	Nem tárolható				A mintát szorosan lezárva kell tárolni. A minta megbontása esetén a mérést azonnal el kell végezni.
189	Mikroalbumin		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			1 hónap	Nem tárolható				A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
190	Molekuláris allergia kimutatása ImmunoCAP módszerrel		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		48 óra	24 óra			7 nap	6 hónap	
191	Mikroalbumin/kreatinin		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső			6 nap	Nem tárolható				Reggeli első vagy második vizelet Albumin/kreatinin ráta számoláshoz vizelet kreatinin mérés is szükséges.
192	Nátrium		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			2 nap	eltartható	
193	Nátrium, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			14 nap	eltartható				A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
194	Neuron specifikus enoláz (NSE)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						24 óra	1 hónap	Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
195	Nikkel, teljes vér		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)			1 hét					
196	Nikkel, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		7 nap	1 hét	2 hét				A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
197	NK sejt citotoxicitás vizsgálata		Teljes vér	Zöld kupakos vérvételi cső (Lithium Heparin)		Nem tárolható	1 hét					Mintavétel kizárólag a Podmaniczky utcai laboratóriumban, előzetes bejelentkezés alapján, kedden és csütörtökön de. 9:30-ig

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2026.02.03. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

ssz	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
198	Növekedési hormon (h-GH)	 	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					Nem tárolható	Nem tárolható	1 hónap	Vérvétel előtt 30 perccel teljes nyugalmi állapot szükséges. Vérvétel után 30 perc múlva centrifugálás és szeparálás, a szérum azonnal lefagyasztható -20C-ra min. 12 óráig a szállításig. Fagyaszta szállítandó.
199	NT-ProBNP		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			6 nap	2 év	
200	Ólom , teljes vér		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)			1 hét					
201	Onkoneuronális (paraneoplasiás) antitestek: Hu, Ri, Yo amphiphysin, CV2.1 PNMA2, Ma-2/Ta		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		Nem tárolható	24 óra				6 hónap	
202	Orális glukóz tolerancia teszt (OGTT)		Plazma	Szürke kupakos vérvételi cső (NaF)			48 óra	Nem tárolható				75 g glukózt 2-300 mL vízben feloldva a betegnek 5-10 percen belül kell elfogyasztania.
203	Oszteocalcin (N-MID)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			3 nap	az analízisig	
204	Ozmolalitás		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		-	7 nap				az analízisig	Minta szorosan lezárva tartandó.
205	Ozmolalitás		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső		2 óra	24 óra					A vizeletet tilos fagyasztani, szorosan lezárva tartandó. A mintaát aznap a laboratóriumba kell juttatni.
206	Összehérje		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			1 hónap	az analízisig	
207	Összehérje vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső			48 óra	az analízisig				A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 8-10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
208	Összehérje, liquor		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			3 nap	1év				
209	Összehérje/kreatinin vizelet		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső			48 óra	az analízisig				Reggeli első vagy második vizelet; fehérje/kreatinin ráta számoláshoz a vizelet kreatinin mérés is szükséges.
210	Ösztadiol (E2)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		24 óra	24 óra			2 nap	6 hónap	
211	Pancreas szigetsejt elleni AT		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			48 óra				6 hónap	
212	Parathormon, intakt	 	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						24 óra	6 hónap	Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 óráig -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyaszta szállítandó.
213	PMN elasztáz ejakulátum		Szeminális plazma	Adalékmentes dugós műanyag cső, vagy csavaros fedelű műanyag pohár			24 óra	12 hónap				Az ejakulátumot a mintaadás után azonnal fagyasztani szükséges -20C-ra vizsgálatonként külön-külön.(pl három vizsgálat esetén három fagyasztott frakció szükséges) Fagyaszta szállítandó.

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2026.02.03. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégségi és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

ssz	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
214	Progeszteron		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
215	Prokalcitonin (PCT)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		Nem tárolható	24 óra			48 óra	az analízisig	
216	Prolactin		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	6 hónap	A mintavétel ébredés után 3 órával, éhgyomorra javasolt
217	Prosztata specifikus antigén, szabad (fPSA)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			48 óra	az analízisig	Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
218	Prosztata specifikus antigén, total		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			48 óra	az analízisig	
219	Protein C		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)					4 óra	4 óra	18 hónap	Lásd részletesen az Antithrombin III -nál.(33.sor)
220	Protein S		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)					4 óra	4 óra	6 hónap	Lásd részletesen az Antithrombin III -nál.(33.sor)
221	Protein S antigén, szabad		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)					24 óra		3 hónap	Lásd részletesen az Antithrombin III -nál.(33.sor)
222	Prothrombin elleni antitest meghatározás (IgG/IgM)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			5 nap	6 hónap	
223	Prothrombin idő		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)					24 óra		14 nap	Rutin alvadási vizsgálat. Aznap levett minta küldése javasolt a primer csőből.
224	Pszeudo-kolinszteráz		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	12 hónap	
225	Punkciós folyadék kémiai vizsgálata		Punkciós folyadék	Adalékmentes dugós műanyag cső			Nem tárolható					
226	Renin - direkt	 	Plazma	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)							2 hónap	A mintavétel után a vérvételi csövet azonnal le kell centrifugálni és -20C-on minimum 12 órán keresztül fagyasztani szükséges. Eztután lehet a laborba szállítani. Figyelem: Hűtőszekrényben (4 °C) nem tartható. Vérvétel előtt minimum 30 perces állás és/vagy fekvés szükséges.
227	Reverz T3		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		4 óra	7 nap			7 nap	2 hónap	
228	Réz - szérum		Szérum	Sötétkék kupakos nyomelemes cső						6 nap	1 hónap	Mintavétel után 30 perc múlva a vérminta centrifugálása és a felülúszó szeparálása szükséges (mivel nincs gélseparátor). A szekunder csöveket sötétkék jellel (matrica, filctoll) ellátni szükséges. Hűtve (+4C) tárolandó és szállítandó de fagyasztani is lehet.
229	Réz, vizelet		Vizelet (gyűjtött)	Adalékmentes dugós műanyag cső		24 óra	1 hét	2 hét			-	A vizelet a gyűjtés alatt hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát összekeverjük és 10 ml mennyiséget adalékmentes műanyag csőbe töltve a laboratóriumba küldünk. A gyűjtött vizelet mennyiségét rögzíteni kell.
230	Rheuma faktor		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			8 nap	3 hónap	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2026.02.03. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

SSZ	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
231	S100 protein		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		24 óra				24 óra	az analízisig	Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
232	Sejtszám, liquor		Liquor	Fehér kupakos vérvételi cső			24 óra			14 nap		A mintavételt követően a liquort azonnal a laboratóriumba kell juttatni.
233	Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		4 óra	24 óra			6 nap	1 hónap	
234	Spermium elleni antitest (szérum)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			8 nap	12 hónap	
235	Széklet vér (human specifikus) kimutatás automatával történő analízissel		Széklet	Stéklettartály FOB GOLD speciális széklet mintavételi eszköz (cső)			14 nap					Feldolgozásra csak az eszközhöz mellékelt mintavételi útmutató szerint küldött minta alkalmas. http://www.synlab.hu/viszsgalat/2351029 http://gold.synlab.hu/viszsgalat/2351029
236	Széklet vér (human specifikus) kimutatás manuális analízissel		Széklet	Széklet tartály			24 óra	2 év				A széklettartály nem helyettesíthető más tárolókkal, a feldolgozáshoz csak borsónyi széklet mennyiség szükséges.
237	Széklet zonulin		Széklet	Speciális mintavevő eszköz			4 nap					A mintavételi eszköz a laboratóriumból igényelhető ld. a speciális mintavételi tájékoztatót is. A nem előírás szerint vett minta (túltöltés/ kevés minta) vizsgálatra nem alkalmas.
238	Szelén - szérum		Szérum	Sötéttek kupakos nyomelemes cső						6 nap	1 hónap	Mintavétel után 30 perc múlva a vérminta centrifugálása és a felülúszó szeparálása szükséges (mivel nincs gélszeparátor). A szekunder csöveket sötéttek jellel (matrica, filctoll) ellátni szükséges. Hűtve de fagyasztva is tárolható!
239	Szolubilis transferrin receptor		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			4 nap			4 nap	3 hónap	
240	Táplálék intolerancia panel (221 táplálék)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		1 óra	* Nem tárolható				2 hónap	
241	Táplálék intolerancia panelek (46 vagy 108 táplálék)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra				6 hónap	
242	Teljes vizelet vizsgálat		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső, vagy csavaros tetejű pohár			12 óra	Nem tárolható				* Mosakodás utáni aznapi reggeli első, közepsugaras vizelet szükséges.
243	Terhességi preeklampszia szűrés - Placenta eredetű növekedési faktor (PIGF), Szolubilis Fms-szerű tirozin-kináz-1 (sFit-1)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		7 nap	24 óra			2 nap	6 hónap	* Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó. 2x300 mikroliter fagyasztott minta küldése szükséges.
244	Terhességi próba (HCG kimutatás)		Vizelet	Adalékmentes dugós műanyag cső, vagy csavaros tetejű pohár			24 óra					Reggeli első vizelet
245	Th1/Th2 citokinek vizsgálata		Teljes vér	Zöld kupakos vérvételi cső (Lithium Heparin)		2 nap	24 óra					Mintavétel kizárólag a Podmaniczky utcai laboratóriumban, előzetes bejelentkezés alapján, kedden és csütörtökön de. 9:30-ig
246	Thrombin idő		Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)					4 óra	4 óra	3 hónap	Rutin alvadási vizsgálat. Aznap levett minta küldése javasolt a primer csőből.

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2026.02.03. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégezési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

ssz	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
247	Thrombophilia immun panel (PL AT szűrés, Annexin AT, Prothr AT, P-szerinAT)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső							6 hónap	
248	Thyreoglobulin (TG)	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	24 hónap	
249	Thyreoglobulin elleni antitest (anti-Tg)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			48 óra			7 nap	az analízisig	
250	Thyreoidea-peroxidáz elleni antitest (Anti-TPO)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		2 óra	48 óra			7 nap	6 hónap	
251	Thyreoidea-Stimuláló Hormon, szuperszenzitív (hTSH)	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			14 nap	24 hónap	
252	Tiroxin, szabad (FT4)	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	1 hónap	
253	Totál tesztoszteron	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		2 óra	24 óra			7 nap	az analízisig	
254	TPA	●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső		4 óra				24 óra	az analízisig	Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
255	Transzferrin	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			8 nap	6 hónap	
256	Triglicerid		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	az analízisig	
257	Trijódtironin, szabad (FT3)	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	1 hónap	
258	Trijódtironin, totál (TT3)	■	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		8 óra	2 nap	az analízisig	
259	Troponin-I, (Kardiális Triponin I) magas szenzitivitású	●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra		8 óra	24 óra	40 nap	Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
260	Troponin-T, (Kardiális Troponin T) magas szenzitivitású	●	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			24 óra	12 hónap	Ha a minta a vérvétel napján nem szállítható a laboratóriumba, centrifugálás, leöntés másodlagos csőbe és min. 12 órás -20C -ra történő fagyasztás szükséges. Fagyasztva szállítandó.
261	TSH receptor elleni stimuláló autoantitest (TSI)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső					24 óra	7 nap	12 hónap	
262	TSH receptor elleni autoantitest (TRAK)		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			6 nap	12 hónap	
263	Üledék, liquor		Liquor	Fehér kupakos vérvételi cső			24 óra			24 óra	-	A mintavételt követően a liquort azonnal a laboratóriumba kell juttatni.
264	Valproinsav		Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			7 nap	24 hónap	
265	Vas	▲	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső			24 óra			21 nap	az analízisig	

SYNLAB Hungary Kft. klinikai kémiai és immunológiai laboratóriumi vizsgálatainak preanalitikai (minta-stabilitási) táblája

Kiadás dátuma: 2026.02.03. Ha nyomtatott példányt használ győződjön meg az érvényességről a honlapon: www.synlab.hu

Figyelem! 2023.12.20-án a minstabilitási tábla új verziója került kiadásra, a géles szérum minták centrifugálás utáni stabilitási idejével és a nyomelem vizsgálatok új mintatípusával. Valamint több vizsgálat stabilitási adatai is felülvizsgálatra és aktualizálásra kerültek, a SYNLAB Hungary vizsgálatvégzési és mintabeszállítási rendjének figyelembe vételével.

ssz	Vizsgálat	Mintavétel feltétele**	Minta	Mintatartó	Mennyiség	Primer minta (pl.: teljes vér, vizelet, géles cső esetén centrifugálás utáni állapot)			Szekunder minta (centrifugálás után egy második, tiszta műanyag csőbe leöntött szérum, plazma)			Megjegyzés
						15-25°C	2-8°C	-20°C	15-25°C	2-8°C	-20°C	
266	Véralkohol		Plazma	Szürke kupakos vérvételi cső (NaF)			3 nap					Az alkohol illékonyága miatt primer mintaküldés szükséges. A mintát szorosan lezárva kell tárolni. A minta megbontása esetén a mérést azonnal el kell végezni. Külön kell csomagolni. A mintán és a csomagoláson is fel kell tüntetni, hogy véralkohol.
267	Vércsoport meghatározás ellenanyag szűréssel		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA) minimum. 6 ml!			5 nap					
268	Vérkép- EDTA indukálta pszeudotrombocitopénia esetén		Teljes vér	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		24 óra						A mintának a mintavétel napján a laborba kell érkeznie.
269	Vérkép mennyiségi és minőségi /retikulocita/ perifériás kenet készítés		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)		8 óra						A mintának a mintavétel napján a laborba kell érkeznie.
270	Vesekő analízis		Vesekő	Adalékmentes dugós műanyag cső, vagy csavaros tetejű pohár		tárolható						
271	Vitamin A	◆	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						7 nap		A mintát fénytől védeni kell! A natív csövet 20-30 perc állás után azonnal centrifugálni kell, a szérumot rögtön sötétbarna szekunder csőbe át kell pipettázni és le kell fagyasztani!
272	Vitamin B1	◆	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						7 nap		Lásd részletesen a Vitamin A-nál (270.sor)
273	Vitamin B2	◆	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						7 nap		Lásd részletesen a Vitamin A-nál (270.sor)
274	Vitamin B3	◆	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						7 nap		Lásd részletesen a Vitamin A-nál (270.sor)
275	Vitamin B5	◆	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						7 nap		Lásd részletesen a Vitamin A-nál (270.sor)
276	Vitamin B6	◆	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						7 nap		Lásd részletesen a Vitamin A-nál (270.sor)
277	Vitamin C	◆	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						5 nap		Lásd részletesen a Vitamin A-nál (270.sor)
278	Vitamin E	◆	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						7 nap		Lásd részletesen a Vitamin A-nál (270.sor)
279	Vitamin H	◆	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						7 nap		Lásd részletesen a Vitamin A-nál (270.sor)
280	Vitamin K1	◆	Szérum	Natív v.clot aktivátoros v. géles vérvételi cső						5 nap		Lásd részletesen a Vitamin A-nál (270.sor)
281	von Willebrand antigén	◆	Plazma	Kék kupakos vérvételi cső (citrátos)		4 óra			4 óra	4 óra	12 hónap	Lásd részletesen az Antithrombin III -nál.(33.sor)
282	Vörösvértest süllyedési sebesség (We)		Teljes vér	Lila kupakos vérvételi cső (EDTA)			24 óra					A mintának a mintavétel napján a laborba kell érkeznie.