


Segítségért vagy további információért forduljon hozzánk a +36 1 5 888 500-as telefonszámom vagy az ugyfelszolgalat@synlab.com e-mail címen.

Kérjük, hogy ne felejtse el regisztrálni a mintát a visszaküldés előtt, mert ennek hiányában a minta feldolgozására nincs lehetőség.

1


BEJELENTKEZÉS / AZ ÚJ EPI KIT AZONOSÍTÓ REGISZTRÁCIÓJA

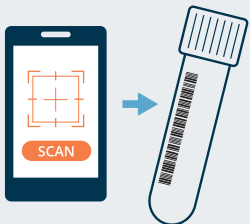

Nyomja meg a bal felső sarokban található menü gombot, és válassza a "Kit ID Information" (KIT azonosító információi) lehetőséget. Nyomja meg az "Add Kit ID" (KIT azonosító hozzáadása) lehetőséget, és olvassa be a cső oldalán található vonalkódot.

2

A CSŐ ELŐKÉSZÍTÉSE

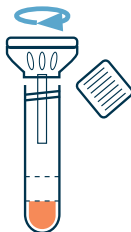


Csavarja le a kupakot és csavarja rá a tölséret. A cső már tartalmazza a tartósító folyadékot.

3

MINTAVÉTEL



FONTOS!
A mintavételt reggel, ébredés után és fogmosás előtt javasolt elvégezni. Evés, ivás vagy dohányzás után várjon 30 percet a mintavétellel.

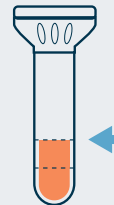


FONTOS!
A teszt elvégzése beteg állapotban, sérülést vagy intenzív testmozgást követően befolyásolhatja az eredményeket.

A csövet tölts fel nyállal a **4 ml**-es vonalig. A nyál összekeveredik a tartósító folyadékkal.

4

MINTA ELŐKÉSZÍTÉSE A VISSZAKÜLDÉSHEZ

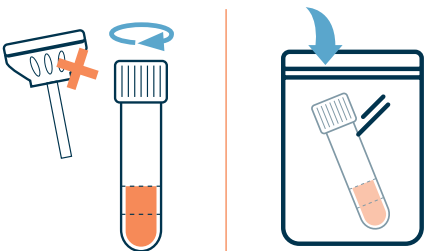

Távolítsa el a tölséret és csavarja a kupakot mintavételi csőre. Helyezze a csövet a tiszta műanyag tasakba és zárja le.

5

VIZSGÁLTKÉRŐLAP KITÖLTÉSE



Töltse ki és írja alá a csomagban található vizsgáltkérő lapot. Írja rá a vizsgáltkérőlapra a csövön található vonalkódot is.

6

MINTA VISSZAKÜLDÉSE



A becsomagolt csövet és a kitöltött vizsgáltkérő lapot tegye a csomagban található borítékba, majd ragassza fel rá a csomagban mellékelte visszaküldő matricát. Az így megcímezett borítékot ingyenesen adhatja fel bármelyik postahivatalban vagy adja le a mintát a kijelölt magánvérvételi helyen. Ha nem tudja a mintát a mintavétel napján visszaküldeni, kérjük, a feladásig tárolja szobahőmérsékleten és max. 3 napon belül küldje el a mintát.