

Textíliák bakteriológiai vizsgálata

Textíliák esetében a mintavétel ún. "kontakt-lemezes" eljárással történik. Ennek során véres agarlemezre lenyomati mintát veszünk, azaz a textíliát óvatosan a táptalaj felületére nyomjuk, ügyelve arra, hogy a táptalaj ne repedjen meg. A mintavételezésnél figyelni kell arra is, hogy a textíliának a vizsgálatra kijelölt területe csak a táptalajjal kerüljön érintkezésbe.

A mintavételt végző személynek orr-szájmaszkot, védősapkát, tiszta védőruhát kell viselnie és a mintavétel előtt higiénés kézfertőtlenítést kell végeznie. A mintavétel zárt helyiségben történjen.

A mintavételhez felhasznált táptalajlemezeket sorszámmal és dátummal jelölve hűtőtáskába kell helyezni, és a mintavételtől számítva 24 órán belül a feldolgozó laboratóriumba kell juttatni.

Minden mintához kísérőiratot (vizsgálatkérő lap) kell mellékelni, melynek a következő adatokat kell tartalmaznia:

- Megrendelő neve
- Megrendelő címe és elérhetőségei
- Mintavétel dátuma
- A minta származási helye (intézmény, osztály, részleg)
- A mintázott textília megnevezése
- A kért vizsgálat(ok)
- Dátum, aláírás

Fontos, hogy egyértelműen azonosítható legyen, hogy melyik táptalaj melyik mintához tartozik!

A laboratóriumban lehetőség van a kitenyészett baktériumok identifikálására is. Amennyiben a baktériumok azonosítását (MALDI vizsgálat) is kérik, kérjük, ezt külön jelöljék a mintavételi jegyzőkönyvön!