

UTM® TRANSPORT SZETT MINTAVÉTELI ESZKÖZ HASZNÁLATA ORR-GARAT NYÁLKAHÁRTYATÖRLET MINTAVÉTELÉHEZ

UTM® TRANSPORT SZETT TARTALMA

- 1 db UTM® minta transzport cső (UTM®, univerzális transzport media, Copan)
- 1 db orr-garat mintavevő pálca (FLOQSwab, Copan)
- Minta csomagolásához: nedvszívó papír, kis simítózáras tasak, nagy simítózáras tasak
- Kérőlap: SYNLAB honlapjáról letölthető




Helyezze az orrlyukba


Törési pont

Ez az útmutató csak illusztrációs célokat szolgál, mely a Copan mintavételi útmutató alapján készült.


MINTAVÉTEL LÉPÉSEI

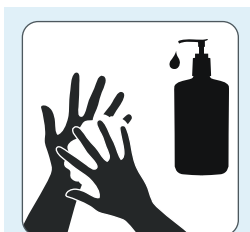


Mosson kezet szappannal és vízzel, húzzon fel orvosi gumikesztyűt.

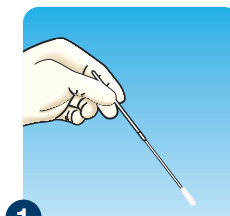

1 Távolítsa el a csomagolásából figyelve arra, hogy ne érjen a kezéhez, a pálcát az eszköz végénél fogja meg, a törési pont jelölését azonosítsa a pálcán, ami egy piros csík.

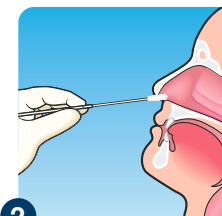

2 Enyhén döntse hátra a páciens fejét.

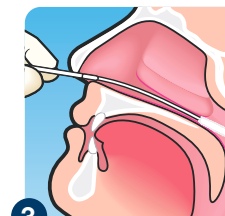


3 Finoman helyezze be a kezét az orrlyukba. Finoman tolja a kezét az orrsövény mentén haladva a hátsó orrgaratba.

Támpontként szemmértékre a kefe érje el a páciens orrlyuka és a füle közötti távolság felét.



4 Amikor a kefe a helyén van, körkörösén forgassa meg a pálcát, és közben finoman mozgassa az orr-garat nyálkahártya felszínén 10-15 másodpercig, majd óvatosan húzza ki.

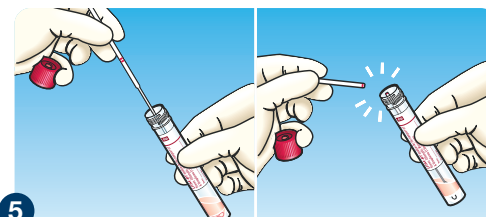

5 Miközben tartja a pálcát, távolítsa el a cső kupakját, figyelve, hogy a kefe ne érjen semmihez.

- Helyezze a kezét a csőbe addig, hogy a törési pont egy szintbe kerüljön a cső nyílásával.
- A pálca szárának letöréséhez hajlítsa meg a pálca szárát 180 fokos szögben a törési pont mentén. Szükség esetén forgassa kissé meg a pálcát, hogy elősegítse a törést.



6 Dobja el a pálca letört részét a veszélyes hulladéktároló dobozba.



7 Csavarja vissza a kupakot a csőre, és írja fel a csőre a beteg azonosító adatait (név, TAJ szám, születési dátum).

Csomagolja be a mintát az alábbiak szerint:

- Helyezze az UTM csövet a kis simítózáras tasakba úgy, hogy a nedvszívó papírral betekeri a csövet, majd zárja le a tasakot.
- Tegye a kitöltött vizsgálatkérő lapot és a becsomagolt mintát a nagy simítózáras tasakba és zárja le.



Dobja ki a gumikesztyűt, mosson kezet szappannal és vízzel.